

## Verdrehsicherung der Bremswelle bei ergo S

Die Korrektur der Feststellbremse ist recht einfach. Die Schraubenmutter, die das Gegenstück zum Hebel ist, wird mit Sekundenkleber neu fixiert. Und so geht dies:

1



2



3



4



5



6



1. Tisch in die höchste Stellung bringen
2. Bedienhebel gegen den Uhrzeigersinn weiter aufschrauben bis ein ca. 2 mm großer Spalt entsteht. (Nicht abschrauben)
3. Auf der einen Seite den Bedienhebel zum Tischgestell drücken und dabei auf der anderen Seite die Abdeckung der Bremse gegenhalten (mittleres Bild). Die Schraubenmutter steht nun 2 bis 3 mm heraus. (Sie wird NICHT abgeschraubt.)
4. Den Rand der Mutter und die Anlagefläche entfetten (unabdingbar für die nachfolgende Verklebung). Dazu eignet sich Nagellackentferner, der mit einem kleinen Pinsel aufgetragen wird (alternativ: Bremsenreiniger).

5. Die gereinigte Fläche trocknen lassen. Mit einem gelförmigen Sekundenkleber zwei bis drei Tropfen des Klebe-Gels auf den Rand der Mutter aufbringen.  
\*(Die Mutter bleibt auf der Welle aufgeschraubt. Unser Detailbild soll nur die Fläche zeigen, auf die der Kleber aufgetragen wird.)
6. Zum Verkleben nun die Schraubenmutter auf die Abdeckung drücken und den Bremshebel auf der anderen Seite festziehen.  
Jetzt die Bremse ca. 24 Stunden fest angezogen lassen bis der Kleber vollständig ausgehärtet ist.

Die Bremswirkung für die Tischverstellung ist damit wieder vollständig hergestellt.